



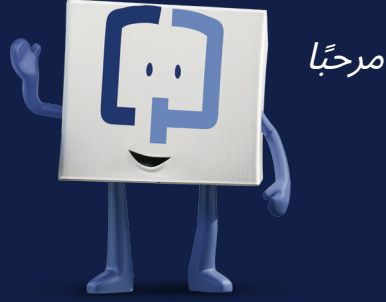

فحص

سرطان القولون

أصبح أسهل

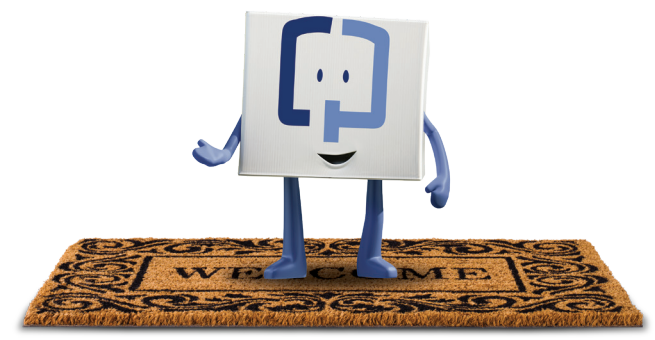

لنبدأ

نشرك على اختبار Cologuard® لإجراء فحص سرطان القولون والمستقيم. استخدم الدليل لمعرفة:

- مدى سهولة الحصول على الاختبار، وجمع العينة، وإرسالها.
- معلومات عن نتائجك
- معلومات عن التأمين الصحي

هل تحتاج إلى المساعدة؟

اتصل بمركز العناية بالعملاء على الرقم 1-844-870-8870 أو شاهد فيديو كيفية الاستخدام على الرابط CologuardTest.com/use.

دواعي الاستعمال

يهدف اختبار Cologuard® إلى الكشف النوعي عن واسمات الحمض النووي (Deoxyribonucleic acid, DNA) المصاحبة لتكون أورام القولون والمستقيم السرطانية، وعن وجود الهيموجلوبين المستتر في براز الإنسان. ويمكن أن تشير النتيجة الإيجابية إلى وجود سرطان في القولون والمستقيم (colorectal cancer, CRC) أو ورم غدي حميد متقدم (advanced adenoma, AA)، وينبغي أن يتبعها إجراء تنظير القولون التشخيصي. يُستخدم Cologuard لفحص البالغين من الجنسين في سن 45 عامًا أو أكثر، والمعرضين لخطورة نموذجية متوسطة للإصابة بسرطان CRC. ولا يعتبر Cologuard بديلًا عن تنظير القولون التشخيصي، أو تنظير القولون بالمراقبة الطبية في حالة الأشخاص المعرضين لخطورة مرتفعة.

موانع الاستعمال

Cologuard مخصص للاستخدام مع المرضى البالغين 45 عامًا أو أكثر، والمعرضين لخطورة متوسطة ويعتبرون مرشحين لنموذجيين لفحص سرطان CRC. لم يخضع اختبار Cologuard للتقييم السريري لأنواع المرضى التاليين:

- المرضى الذين لديهم تاريخ إصابة بسرطان القولون والمستقيم، أو الأورام الغدية الحميدة، أو السرطانات الأخرى ذات الصلة.
- المرضى الذين حصلوا على نتيجة إيجابية في إحدى الطرق الأخرى لفحص سرطان القولون والمستقيم خلال الأشهر الستة الأخيرة.
- المرضى الذين شُخصوا بحالة مرضية تصاحب الخطورة المرتفعة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وتتضمن هذه الحالات، على سبيل المثال لا الحصر:

- مرض التهاب الأمعاء (Inflammatory Bowel Disease, IBD)
- التهاب القولون التقرحي المزمن (Chronic ulcerative colitis, CUC)
- داء كرون
- داء السللائل الورمي الغدي الوراثي (Familial adenomatous polyposis, FAP)
- تاريخ وراثي من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم

- المرضى الذين شُخصوا بالإصابة بمتلازمة سرطانية عائلية (وراثية) ذات صلة، مثل متلازمة سرطان القولون والمستقيم غير السللالي الوراثية (Hereditary nonpolyposis colorectal cancer syndrome, HNPCCC)، أو متلازمة لينتش، أو متلازمة بويتز جيفرز، أو داء السللائل المرتبط بطفرة الجين MYH (MYH-Associated Polyposis, MAP)، أو متلازمة غاردنر، أو متلازمة تركو (أو كريل)، أو متلازمة كاودن، أو داء السللائل اليفعي، أو متلازمة كرونكايت كندا، أو ورم ليفي عصبي، أو داء السللائل الوراثي مفرط التنسج.

تحذيرات واحتياطات

- ثبت أداء اختبار Cologuard في دراسة مستعرضة (أي، في نقطة زمنية واحدة). لم يخضع الأداء الممنهج لاختبار Cologuard (أي، الفوائد والمخاطر المصاحبة للاختبار المتكرر طوال فترة زمنية محددة) للدراسة. كما لم يخضع الأداء للتقييم في البالغين الذين خضعوا للاختبار في الماضي باستخدام Cologuard. كذلك لم تثبت أفضلية أو سوء الحساسية الممنهجة لاختبار Cologuard مقارنةً بأساليب فحص سرطان CRC وورم AA الأخرى الموصى بها.

- أُجريت دراسات التحقق من الفعالية السريرية على المرضى الذين تجاوزوا 50 عامًا، وتوصي الإرشادات التوجيهية لجمعية السرطان الأمريكية (American Cancer Society, ACS) ببدء إجراء الفحوصات عند بلوغ 45 عامًا. وخضع أداء Cologuard للتقدير مع المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و49 عامًا عن طريق إجراء تحليل المجموعة الفرعية للمجموعات التي تقارب سنها هذه الفئات العمرية.

- تختلف توصيات الإرشادات التوجيهية لفحص سرطان CRC مع الأشخاص الأكبر من 75 عامًا، وينبغي أن يُتخذ قرار فحص الأشخاص الأكبر من 75 عامًا على أساس فردي بالتشاور مع مقدم الرعاية الصحية. ينبغي تفسير نتائج اختبار Cologuard بحذر في المرضى الأكبر سنًا حيث يزيد معدل ظهور نتائج إيجابية كاذبة مع التقدم في السن.

- لا تضمن النتيجة السلبية لاختبار Cologuard عدم وجود سرطان أو ورم غدي متقدم. ينبغي نصح المرضى أصحاب النتيجة السلبية في اختبار Cologuard بمواصلة المشاركة في برنامج فحص سرطان القولون والمستقيم باستخدام طريقة فحص أخرى موصى بها، لم تتحدد الفترة الزمنية الفاصلة بين الفحوصات لهذه المتابعة بعد.

- قد يعطي اختبار Cologuard نتائج سلبية كاذبة أو نتائج إيجابية كاذبة. وتكون النتيجة إيجابية كاذبة عندما يعطي Cologuard نتيجة إيجابية، رغم عدم كشف تنظير القولون عن وجود سرطان أو سللائل حميدة سابقة للتسرطن. وتكون النتيجة سلبية كاذبة عندما لا يكشف اختبار Cologuard عن وجود السللائل السابقة للتسرطن، أو سرطان القولون والمستقيم حتى عندما يحدد تنظير القولون نتيجة إيجابية.

- ينبغي ألا يقدّم المرضى عينة لاختبار Cologuard إذا كانوا مصابين بالإسهال، أو كان لديهم دم في البول أو البراز (مثلًا نزيف البواسير أو الجروح النازفة في اليدين، أو نزيف المستقيم، أو الحيض).

- للتأكد من سلامة العينة، يتعين على المختبر استلام عينات المريض خلال 72 ساعة من جمعها، وينبغي للمرضى إرسال عينات البراز إلى المختبر وفقًا للتعليمات المذكورة في دليل المريض الخاص بـ Cologuard.

- ينبغي إعلام المرضى بالتنبيهات المدرجة في دليل المريض الخاص بـ Cologuard. وينبغي ألا يشرب المرضى المادة الحافظة.

- المخاطر المتعلقة باستخدام مجموعة أدوات Cologuard منخفضة، ولم يُبلغ عن وقوع أحداث ضارة خطيرة بين الأشخاص في أي تجربة سريرية. ينبغي للمرضى توخي الحذر عند فتح الأغذية وإغلاقها لتجنب خطر إصابة اليد.

الحصول على الاختبار

إليك أخبار جيدة! اختبار Cologuard في متناول يديك.

بمجرد أن يرسل لنا مقدم الرعاية الصحية طلبك المكتمل، سنرسل لك مباشرة مجموعة أدوات اختبار Cologuard! ستلقى أيضًا مكالمات ترحيبية لمعرفة المزيد عن عملية جمع العينة وإعادتها.

لمعرفة المزيد عما يمكنك توقعه، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني
CologuardTest.com/whatsnext



هل تحتاج إلى المساعدة؟

اتصل بمركز العناية بالعملاء على الرقم 1-844-870-8870 أو
شاهد فيديو كيفية الاستخدام على الرابط CologuardTest.com/use.

جمع العينة

عملية جمع العينة سهلة للغاية، وإليك بعض النصائح!

لا توجد استعدادات خاصة. لا حاجة إلى طلب إجازة، ولا إجراء تغيير في نظامك الغذائي أو أدويةك.



اجمع عينتك بخصوصية في منزلك (ينبغي ألا يتجاوز حجم العينة زجاجة السائل المتضمنة في مجموعة الأدوات). ينبغي ألا تجمع العينة إذا كنت تعاني من الإسهال أو دم في البول أو البراز (مثلًا نزيف البواسير، أو الجروح النازفة في اليد، أو نزيف المستقيم، أو الحيض).



الصندوق الذي تتسلمه هو أيضًا الصندوق الذي ستعيد إرساله مع عينتك. كيف جهزنا هذا الصندوق؟ يساعد الكيس الداخلي على احتواء التسريبات، لذا يُرجى عدم إزالة هذا الجزء لأنه ملصوق بالغراء بالفعل.



أعد عينتك خلال 24 ساعة من جمعها وفقًا للتعليمات المفصلة داخل مجموعة الأدوات.



نظرًا لاحتمالية تأخير خدمات البريد في عطلة نهاية الأسبوع، ننصحك بجمع عينتك وشحنها بين أيام الاثنين والخميس.


ستحصل على دليل المريض المفصل لاختبار Cologuard®، الذي يحتوي على تعليمات تفصيلية، ضمن مجموعة أدواتك. إذا كنت تحب مشاهدة مقاطع فيديو عن كيفية الاستخدام، فأنت محظوظ! **بادر بزيارة الرابط CologuardTest.com/use**



هل تحتاج إلى المساعدة؟

اتصل بمركز العناية بالعملاء على الرقم 1-844-870-8870 أو شاهد فيديو كيفية الاستخدام على الرابط CologuardTest.com/use.



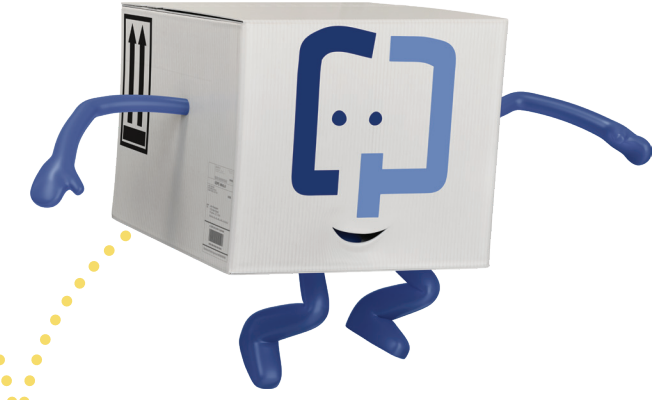

إرسال العينة

أعدها إلينا خلال 24 ساعة! اتبع الخطوات البسيطة التالية.

1 أكمل الملصقات 2 ثبّت ملصقاتك 3 اشحن عينتك

من المهم جدًا أن تكتب اسمك كما هو مكتوب بالضبط على ملصق الشحن. تأكد من كتابة تاريخ ميلادك، وتاريخ ووقت جمع العينة أيضًا. تساعد دقة البيانات المذكورة على الملصق فريق المختبر لدينا على تقديم النتائج في أسرع وقت ممكن.

بعد إكمال الملصقات، ثبتها بإحكام على غطاء الحاوية والأنبوب.

ضع العينة بعد تثبيت الملصق في الصندوق. توجد ملصقات الشحن بالفعل على الصندوق. ويمكنك شحنها من أي موقع لشركة UPS، أو حدد موعدًا لاستلامها من مندوب عن طريق الرابط cologuardtest.com/pickupmykit أو بالاتصال على الرقم 1-800-PICKUPS. الشحن مجاني!

هل تحتاج إلى المساعدة؟

اتصل بمركز العناية بالعملاء على الرقم 1-844-870-8870 أو شاهد فيديو كيفية الاستخدام على الرابط CologuardTest.com/use.

اعرف نتائجك

بمجرد استلامنا لمجموعة أدواتك، سيجري مختبرنا الاختبارات على عينتك فورًا وستحصل على النتيجة في غضون أسبوعين. سنرسل النتائج إلى مقدم الرعاية الصحية المختص بك الذي سيتابعك ويناقشك بعد فترة وجيزة. ولكن في الوقت الحالي، إليك نظرة عامة سريعة على ما يمكن توقعه.

النتيجة السلبية



- تعني النتيجة السلبية أن الاختبار لم يكشف عن وجود DNA شاذ و/أو دم يمكن أن يكون نتيجة لوجود خلايا سابقة للتسرطن أو سرطان في القولون.
- خُطِّط للخضوع للفحص مرة أخرى في الوقت الذي يُوصيك به مقدم الرعاية الصحية. توصي جمعية السرطان الأمريكية بتكرار إجراء اختبار Cologuard كل 3 سنوات من الحصول على نتيجة سلبية.
- غير مستبعد ظهور نتائج سلبية كاذبة. وتكون النتيجة سلبية كاذبة عندما لا يكشف اختبار Cologuard عن وجود السلائل السابقة للتسرطن، أو سرطان القولون والمستقيم حتى عندما يحدد تنظير القولون نتيجة إيجابية.

النتيجة الإيجابية



- تعني النتيجة الإيجابية أن الاختبار قد كشف عن وجود DNA شاذ و/أو دم يمكن أن يكون نتيجة لوجود خلايا سابقة للتسرطن أو سرطان في القولون.
- ينبغي أن يُجرى تنظير القولون بعد الحصول على أي نتيجة إيجابية.
- غير مستبعد ظهور نتائج إيجابية كاذبة. وتكون النتيجة إيجابية كاذبة عندما يعطي Cologuard نتيجة إيجابية، رغم عدم كشف تنظير القولون عن وجود سرطان أو سلائل حميدة سابقة للتسرطن.

هل تحتاج إلى المساعدة؟

اتصل بمركز العناية بالعملاء على الرقم 1-844-870-8870 أو شاهد فيديو كيفية الاستخدام على الرابط CologuardTest.com/use.

لقد حصلنا لك على التغطية

يتمتع اختبار Cologuard بالتغطية التأمينية من
برنامج Medicare وأغلب شركات التأمين الكبرى.

يتمتع اختبار Cologuard بالتغطية التأمينية من برنامج Medicare وخطة Medicare Advantage دون مدفوعات مشتركة أو مستقطعات للمرضى المؤهلين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و85 عامًا.

على المستوى القومي، هناك أكثر من 94% من المرضى المستخدمين لاختبار Cologuard لا يدفعوا أي تكاليف من مالهم الخاص لإجراء الاختبار.

• وفقًا لقانون الرعاية الميسورة التكلفة، ينبغي أن تغطي معظم شركات التأمين الخاصة اختبار Cologuard دون مدفوعات مشتركة أو مستقطعات للمرضى المؤهلين (الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و75 عامًا، والعرضة لخطورة متوسط من الإصابة بسرطان القولون، ولا تظهر عليهم أعراض).

في الوقت الحالي، هناك 74% تقريبًا من المرضى المستخدمين لاختبار Cologuard الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و49 عامًا لا يدفعوا أي تكاليف من مالهم الخاص لإجراء الاختبار.

• تبدأ العديد من جهات الدفع القومية والإقليمية دفع تكاليف فحص سرطان CRC عند سن 45 عامًا. تواصل شركة Exact Sciences العمل مع جهات الدفع لتوسيع نطاق التغطية والوصول للمرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و49 عامًا.

دعم المريض


قد تُطبق استثناءات للتغطية، ولا يمكن لأحد سوى شركة التأمين الخاصة بك تأكيد كيفية تغطية اختبار Cologuard لحالتك. يمكن لفريقنا من المتخصصين مساعدتك على التواصل مع شركتك التأمينية وطرح الأسئلة المناسبة - يُرجى الاتصال بنا على الرقم 1-844-870-8870.

يعتمد تقدير Exact Sciences على تاريخ إصدار الفواتير للمريض اعتبارًا من 1 أكتوبر 2019. يختلف معدل التغطية حسب الولاية والمنطقة. قد تُطبق استثناءات للتغطية، ولا يمكن لأحد سوى شركة التأمين الخاصة بك تأكيد كيفية تغطية اختبار Cologuard لحالتك.


تعرف على المزيد عبر الرابط Cologuardtest.com/insurance.

هل تحتاج إلى المساعدة؟

اتصل بمركز العناية بالعملاء على الرقم 1-844-870-8870 أو
شاهد فيديو كيفية الاستخدام على الرابط CologuardTest.com/use.

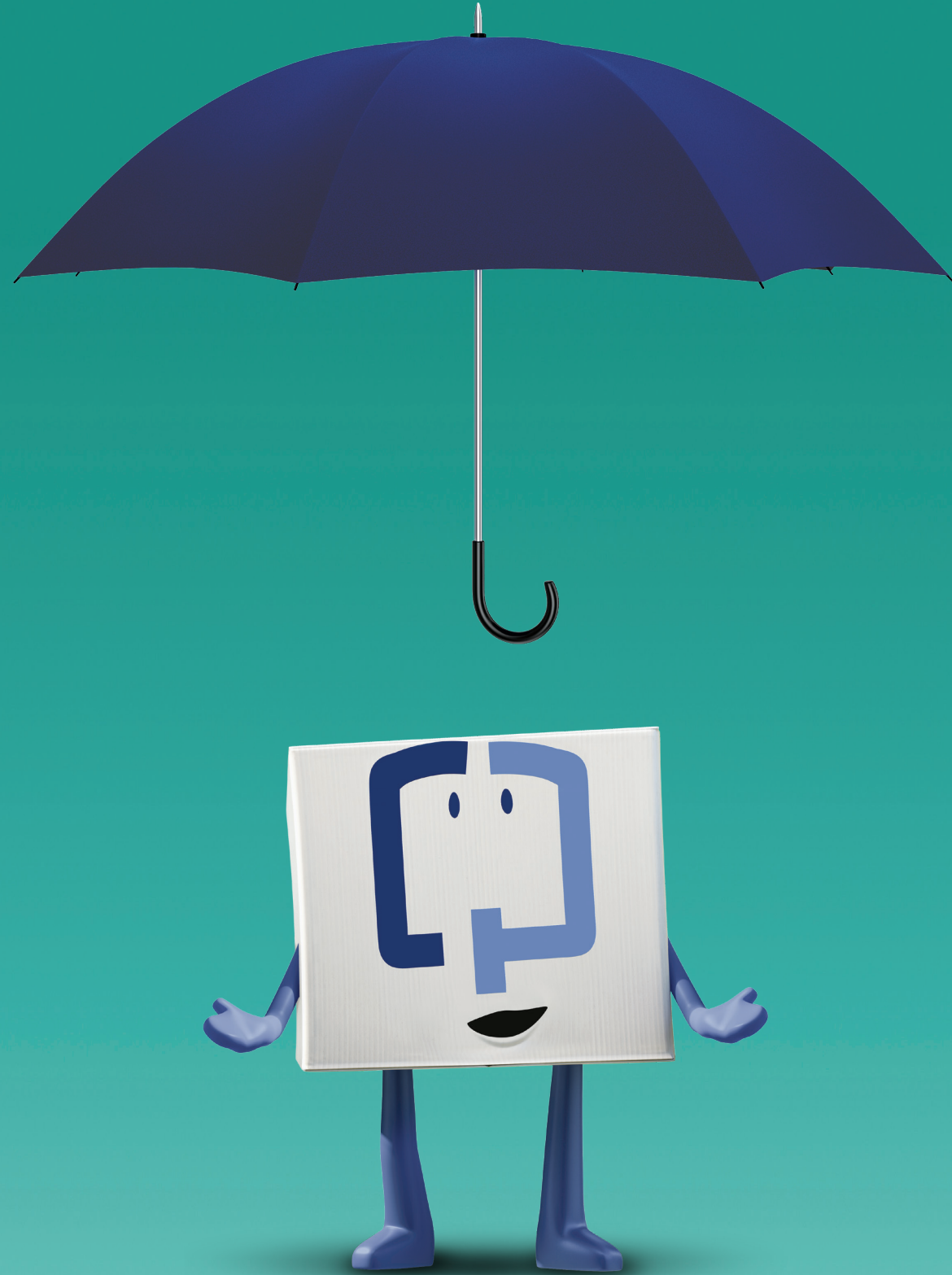

تذكيرة للبقاء على المسار الصحيح!

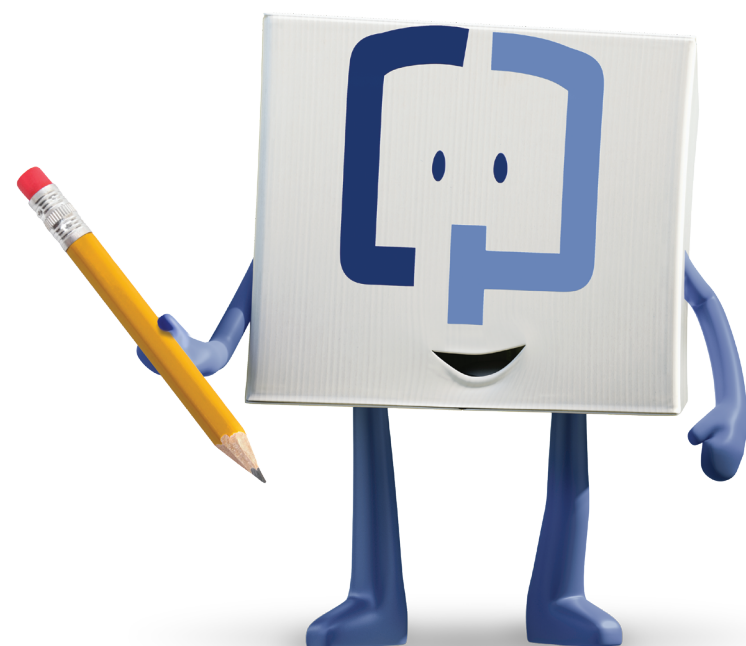


استخدم هذا المغناطيس لإخراج عينتك من الباب
خلال 24 ساعة من جمعها وتدوين التواريخ المهمة.

هل تحتاج إلى المساعدة؟

اتصل بمركز العناية بالعملاء على الرقم 1-844-870-8870 أو
شاهد فيديو كيفية الاستخدام على الرابط CologuardTest.com/use.

سوف نراكم قريبًا!

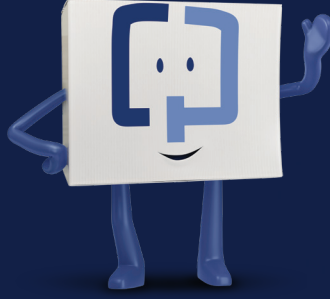

EXACT SCIENCES CORPORATION
#441 Charmany Drive, Madison, WI 53719
ExactSciences.com | ExactLabs.com

1-844-870-8870

Exact Sciences علامة تجارية مسجلة لشركة Exact Sciences
حقوق الطبع والنشر © لعام 2019 محفوظة لشركة Exact Sciences. جميع الحقوق محفوظة.
US.CG.1560-3 أكتوبر 2019

لمزيد من المعلومات المفيدة، تفضل بزيارة CologuardTest.com

 cologuard®
Rx only

EXACT
SCIENCES