

Chào mừng.

UNG THƯ RUỘT KẾT
TÀM SOÁT

thật dễ dàng

CHỈ ĐỊNH

Cologuard® dùng để phát hiện định tính dấu DNA liên quan đến khối u trực kết tràng và sự có mặt của hemoglobin ẩn trong phân người. Kết quả dương tính có thể cho biết sự xuất hiện của ung thư trực kết tràng (CRC) hoặc u tuyến sớm (AA) và cần được theo dõi bằng phương pháp nội soi ruột kết chẩn đoán. Cologuard được chỉ định để sàng lọc những người ở độ tuổi trưởng thành, cả nam và nữ, từ 45 tuổi trở lên, là những người có nguy cơ bị CRC trung bình điển hình. Cologuard không thay thế cho soi kết tràng chẩn đoán hay soi kết tràng theo dõi ở những cá nhân có nguy cơ cao.


CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Cologuard nhằm mục đích sử dụng cho các bệnh nhân từ 45 tuổi trở lên, có nguy cơ trung bình và là những ứng viên điển hình cho sàng lọc CRC. Cologuard đã không được đánh giá lâm sàng cho các loại bệnh nhân sau đây:

- Bệnh nhân có tiền sử ung thư trực kết tràng, u tuyến, hoặc các bệnh ung thư khác có liên quan.
- Bệnh nhân đã có kết quả dương tính từ một phương pháp sàng lọc ung thư trực kết tràng khác trong vòng 6 tháng gần đây nhất.
- Bệnh nhân đã được chẩn đoán có tình trạng liên quan đến nguy cơ ung thư trực kết tràng cao. Những tình trạng này bao gồm nhưng không giới hạn:
 - Bệnh viêm đường ruột (IBD)
 - Viêm loét đại tràng mạn tính (CUC)
 - Bệnh Crohn
 - Đa polyp gia đình (FAP)
 - Tiền sử gia đình bị ung thư trực kết tràng
- Bệnh nhân từng được chẩn đoán mắc hội chứng ung thư (di truyền) gia đình có liên quan, như hội chứng ung thư trực kết tràng di truyền không do polyp (HNPCCC hoặc Hội chứng Lynch), Hội chứng Peutz-Jeghers, Polyp liên quan đến MYH (MAP), hội chứng Gardner, hội chứng Turcot (hoặc Crail), hội chứng Cowden, Đa polyp trẻ em, hội chứng Cronkhite-Canada, Bệnh u xơ thần kinh hoặc Đa polyp tăng sản gia đình.

CẢNH BÁO VÀ PHÒNG NGỪA

- Hiệu quả của Cologuard đã được chứng minh trong một nghiên cứu tiêu biểu tại một thời điểm (đó là thời điểm duy nhất). Hiệu quả theo quy trình của Cologuard (tức là các lợi ích và nguy cơ với xét nghiệm lặp lại qua một khoảng thời gian đã được thiết lập) chưa được nghiên cứu. Hiệu quả chưa được đánh giá ở những người trưởng thành mà trước đó đã từng xét nghiệm với Cologuard. Sự không thua kém hay tính ưu việt của độ nhạy theo quy trình của Cologuard so với các phương pháp sàng lọc được khuyến nghị khác đối với CRC và AA chưa được xác nhận.
- Các nghiên cứu lâm sàng về độ chuẩn xác đã được tiến hành ở bệnh nhân trên 50 tuổi. Hướng dẫn ACS khuyến nghị tầm soát bắt đầu ở độ tuổi 45. Hiệu quả của Cologuard ở những bệnh nhân từ 45 đến 49 tuổi được ước tính theo phân tích nhóm phụ từ các nhóm có độ tuổi tương tự.
- Các đề xuất hướng dẫn sàng lọc CRC khác nhau ở những người trên 75 tuổi. Quyết định sàng lọc những người trên 75 tuổi phải được đưa ra trên cơ sở cá nhân hóa với sự tư vấn của một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Kết quả xét nghiệm Cologuard phải được hiểu một cách thận trọng ở những bệnh nhân lớn tuổi vì tỷ lệ kết quả dương tính giả tăng lên theo độ tuổi.
- Kết quả xét nghiệm Cologuard âm tính không đảm bảo là không bị ung thư hoặc u tuyến sớm. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm Cologuard âm tính nên được tư vấn tiếp tục tham gia chương trình sàng lọc ung thư trực kết tràng với một phương pháp sàng lọc được khuyến nghị khác. Thời gian sàng lọc cho chương trình tiếp theo này chưa được thiết lập.
- Cologuard có thể tạo ra kết quả âm tính giả hoặc dương tính giả. Kết quả dương tính giả xảy ra khi Cologuard tạo ra kết quả dương tính, cho dù soi ruột kết sẽ không phát hiện ung thư hoặc polyp tiền ung thư. Kết quả âm tính giả xảy ra khi Cologuard không phát hiện thấy polyp tiền ung thư hoặc ung thư trực kết tràng thậm chí khi soi ruột kết xác định kết quả dương tính.
- Bệnh nhân không nên cung cấp mẫu cho Cologuard nếu họ bị tiêu chảy hoặc có lẫn máu trong nước tiểu hoặc phân của họ (ví dụ: từ trĩ xuất huyết, bị đứt tay hoặc bị trầy xước chảy máu, chảy máu hậu môn hoặc đang có kinh nguyệt).
- Để đảm bảo sự nguyên vẹn của mẫu, phòng thí nghiệm phải nhận mẫu xét nghiệm của bệnh nhân trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu. Bệnh nhân nên gửi các mẫu phân tới phòng thí nghiệm theo hướng dẫn được nêu trong Hướng Dẫn Dành Cho Bệnh Nhân Cologuard.
- Bệnh nhân được tư vấn về cảnh báo được nêu trong Hướng Dẫn Dành Cho Bệnh Nhân Cologuard. Bệnh nhân KHÔNG được uống chất bảo quản.
- Nguy cơ liên quan đến việc sử dụng Bộ lấy mẫu là thấp và không có các tác động bất lợi nghiêm trọng nào được báo cáo trong số những người thử nghiệm lâm sàng. Bệnh nhân cần cẩn thận khi mở và đóng các nắp để tránh làm sưng tay.

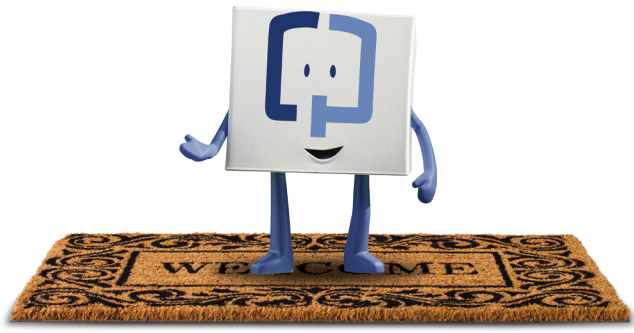

HÃY BẮT ĐẦU

Cám ơn quý vị đã chọn Cologuard® để được tầm soát ung thư trực kết tràng. Sử dụng hướng dẫn này để tìm hiểu:

- Mức độ dễ dàng khi **NHẬN. TIẾN HÀNH. XONG.**
- Thông tin về kết quả của quý vị
- Thông tin về bảo hiểm

QUÝ VỊ CẦN HỖ TRỢ?

Hãy gọi đến Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi theo số **1-844-870-8870** hoặc xem video hướng dẫn cách sử dụng tại địa chỉ **CologuardTest.com/use**.



NHẬN

Tin vui! Cologuard gần như đang trên đường đến.

Sau khi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe gửi cho chúng tôi đơn hàng hoàn chỉnh của quý vị, chúng tôi sẽ gửi bộ lấy mẫu Cologuard đến cho quý vị! Quý vị cũng sẽ nhận được cuộc gọi chào mừng để tìm hiểu thêm về cách lấy và gửi lại mẫu của mình.

Để tìm hiểu thêm về những điều quý vị có thể mong đợi, hãy vào trang CologuardTest.com/whatsnext.

QUÝ VỊ CẦN HỖ TRỢ?

Hãy gọi đến Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi theo số **1-844-870-8870** hoặc xem video hướng dẫn cách sử dụng tại địa chỉ **CologuardTest.com/use**.



TIẾN HÀNH

Lấy mẫu thật dễ dàng. Sau đây là một vài gợi ý!



Không cần chuẩn bị đặc biệt. Không cần nghỉ việc. Không có sự thay đổi chế độ ăn uống hoặc thuốc của quý vị.



Lấy mẫu tại nhà riêng của quý vị (mẫu không được nhiều hơn bình đựng chất lỏng trong bộ lấy mẫu). Quý vị không nên cung cấp mẫu nếu quý vị bị tiêu chảy hoặc có lẫn máu trong nước tiểu hoặc phân (ví dụ: từ xuất huyết, bệnh trĩ, bị đứt tay hoặc bị trầy xước chảy máu, chảy máu hậu môn hoặc đang có kinh nguyệt).



Hộp quý vị nhận được cũng là hộp mà quý vị sẽ gửi lại kèm theo mẫu. *Quá tiện đúng không?* Túi trong giúp ngăn rò rỉ, **do đó xin không bỏ phần đó do thực tế phần này đã được dán chặt.**



Gửi lại mẫu trong vòng 24 giờ kể từ khi lấy mẫu theo hướng dẫn chi tiết trong bộ lấy mẫu.


Do đường bưu điện cuối tuần có thể bị chậm trễ, chúng tôi đề nghị quý vị lấy mẫu và gửi mẫu trong khoảng thời gian từ thứ Hai đến thứ Năm.



Quý vị sẽ nhận được Hướng Dẫn Dành Cho Bệnh Nhân Cologuard® chi tiết với hướng dẫn từng bước trong bộ lấy mẫu của quý vị. Nếu quý vị thích video hướng dẫn cách sử dụng, quý vị thật may mắn!
Vào trang CologuardTest.com/use.

QUÝ VỊ CẦN HỖ TRỢ?

Hãy gọi đến Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi theo số **1-844-870-8870** hoặc xem video hướng dẫn cách sử dụng tại địa chỉ **CologuardTest.com/use**.

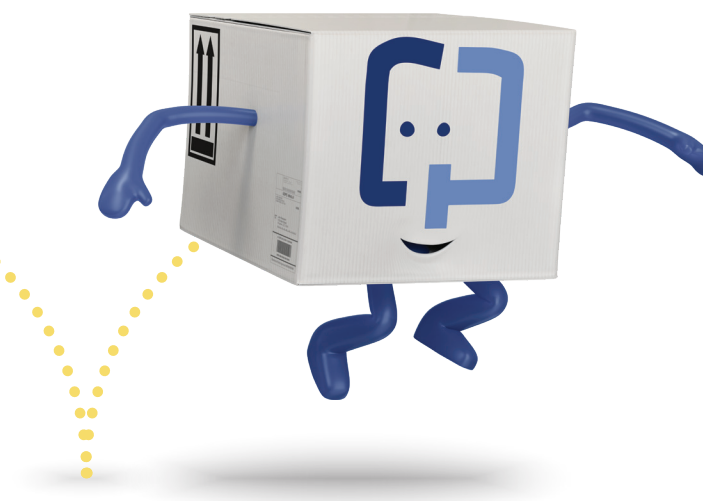

XONG

Gửi lại cho tôi trong vòng 24 giờ! Thực hiện theo các bước đơn giản này.

- 1 Điền vào các nhãn.**
Một điều rất quan trọng là viết chính xác tên của quý vị như tên được viết trên nhãn vận chuyển. Đừng quên viết ngày sinh của quý vị, cũng như ngày và giờ quý vị lấy mẫu. Việc ghi nhãn chính xác giúp nhóm thí nghiệm của chúng tôi cung cấp cho quý vị kết quả sớm nhất có thể.
- 2 Đính kèm nhãn của quý vị**
Sau khi điền đầy đủ vào nhãn, gắn chặt vào nắp và lọ đựng mẫu.
- 3 Gửi mẫu của quý vị**
Cho mẫu đã được ghi nhãn vào hộp. Nhãn vận chuyển đã có trong hộp. Quý vị có thể gửi mẫu từ bất kỳ địa điểm nào trong Hoa Kỳ, hoặc đặt lịch lấy mẫu tại cologuardtest.com/pickupmykit hoặc gọi đến số 1-800-PICKUPS. **Không yêu cầu thanh toán vận chuyển!**

QUÝ VỊ CẦN HỖ TRỢ?

Hãy gọi đến Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi theo số **1-844-870-8870** hoặc xem video hướng dẫn cách sử dụng tại địa chỉ **CologuardTest.com/use**.

BIẾT KẾT QUẢ CỦA QUÝ VỊ

Sau khi chúng tôi nhận được bộ lấy mẫu của quý vị, phòng thí nghiệm của chúng tôi sẽ xét nghiệm mẫu ngay lập tức và có kết quả thường trong vòng hai tuần. Chúng tôi sẽ gửi kết quả đến nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị, họ sẽ theo dõi và thảo luận với quý vị không lâu sau đó. Nhưng hiện tại, sau đây là tổng quan nhanh về những điều mong đợi.

KẾT QUẢ DƯƠNG TÍNH

- Kết quả dương tính nghĩa là xét nghiệm đã phát hiện DNA và/hoặc máu bất thường có thể do tiền ung thư hoặc ung thư trong ruột kết gây ra.
- Bất cứ kết quả dương tính nào cũng cần được tiến hành soi ruột kết sau đó.
- Kết quả dương tính giả có xảy ra. Kết quả dương tính giả xảy ra khi Cologuard tạo ra kết quả dương tính, cho dù soi ruột kết sẽ không phát hiện ung thư hoặc polyp tiền ung thư.

KẾT QUẢ ÂM TÍNH

- Kết quả âm tính nghĩa là xét nghiệm đã không phát hiện DNA và/hoặc máu bất thường có thể do tiền ung thư hoặc ung thư trong ruột kết gây ra.
- Lập kế hoạch được tầm soát lại vào một thời điểm do nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khuyến nghị. Hội Ung Thư Hoa Kỳ khuyến nghị lặp lại Cologuard mỗi 3 năm một lần sau khi có kết quả âm tính.
- Kết quả âm tính giả có xảy ra. Kết quả âm tính giả xảy ra khi Cologuard không phát hiện thấy polyp tiền ung thư hoặc ung thư trực kết tràng thậm chí khi soi ruột kết xác định kết quả dương tính.

QUÝ VỊ CẦN HỖ TRỢ?

Hãy gọi đến Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi theo số **1-844-870-8870** hoặc xem video hướng dẫn cách sử dụng tại địa chỉ **CologuardTest.com/use**.

CHÚNG TÔI BAO TRẢ CHO QUÝ VỊ

Cologuard được Medicare và phần lớn các công ty bảo hiểm bao trả.

Cologuard được Medicare và Medicare Advantage bao trả không có khoản đồng thanh toán hoặc khấu trừ đối với bệnh nhân đủ điều kiện từ 50-85 tuổi.

Trên toàn quốc có hơn 94% bệnh nhân Cologuard không có chi phí xuất túi để tầm soát.

- Theo Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Hợp Túi Tiền, Cologuard sẽ được hầu hết các công ty bảo hiểm tư nhân bao trả không có khoản đồng thanh toán hoặc khấu trừ đối với bệnh nhân đủ điều kiện (từ 50-75 tuổi; với rủi ro mắc ung thư ruột kết trung bình; không có các triệu chứng).

Hiện tại, khoảng 74% bệnh nhân từ 45-49 tuổi sử dụng Cologuard không có chi phí xuất túi để tầm soát.

- Nhiều tổ chức thanh toán trong nước và trong khu vực đã bắt đầu thanh toán để tầm soát CRC ở độ tuổi 45.
Exact Sciences tiếp tục làm việc với các tổ chức thanh toán để mở rộng phạm vi và tiếp cận bảo hiểm cho những bệnh nhân từ 45-49 tuổi.

Hỗ trợ bệnh nhân


Các trường hợp ngoại lệ bảo hiểm có thể áp dụng; chỉ công ty bảo hiểm của quý vị mới có thể xác nhận cách Cologuard sẽ được bao trả cho quý vị như thế nào. Nhóm chuyên gia của chúng tôi có thể giúp quý vị liên lạc với công ty bảo hiểm của quý vị và đặt câu hỏi thích hợp – vui lòng gọi đến chúng tôi theo số 1-844-870-8870.

Exact Sciences ước tính dựa trên hóa đơn trước đây của bệnh nhân kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2019. Mức bảo hiểm thay đổi theo tiểu bang và khu vực. Các trường hợp ngoại lệ bảo hiểm có thể áp dụng, chỉ công ty bảo hiểm của quý vị mới có thể xác nhận cách Cologuard sẽ được bao trả cho quý vị như thế nào.


Tìm hiểu thêm tại Cologuardtest.com/insurance.

QUÝ VỊ CẦN HỖ TRỢ?

Hãy gọi đến Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi theo số **1-844-870-8870** hoặc xem video hướng dẫn cách sử dụng tại địa chỉ **CologuardTest.com/use**.

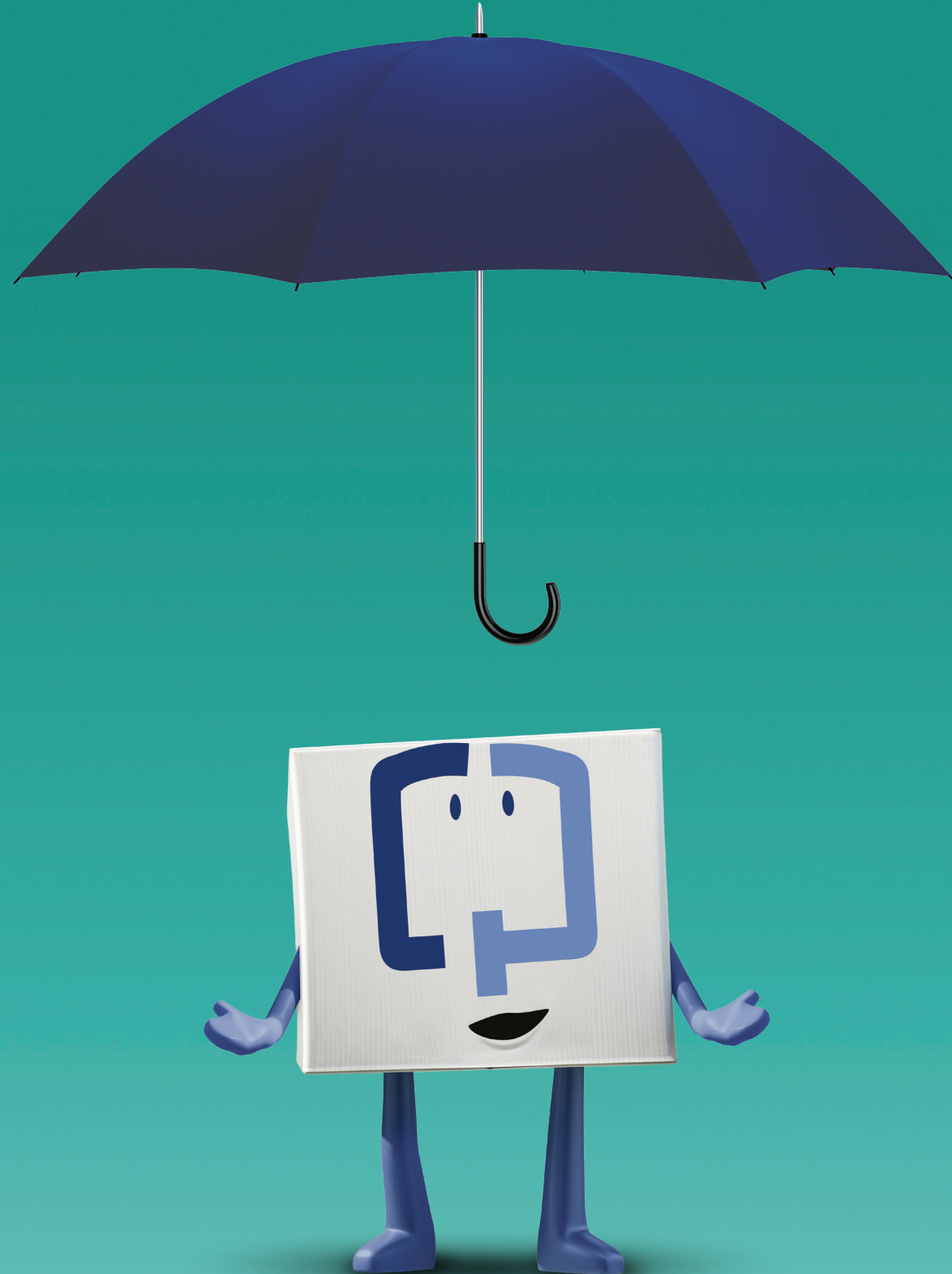

NHẮC NHỞ GIÚP THEO DÕI!

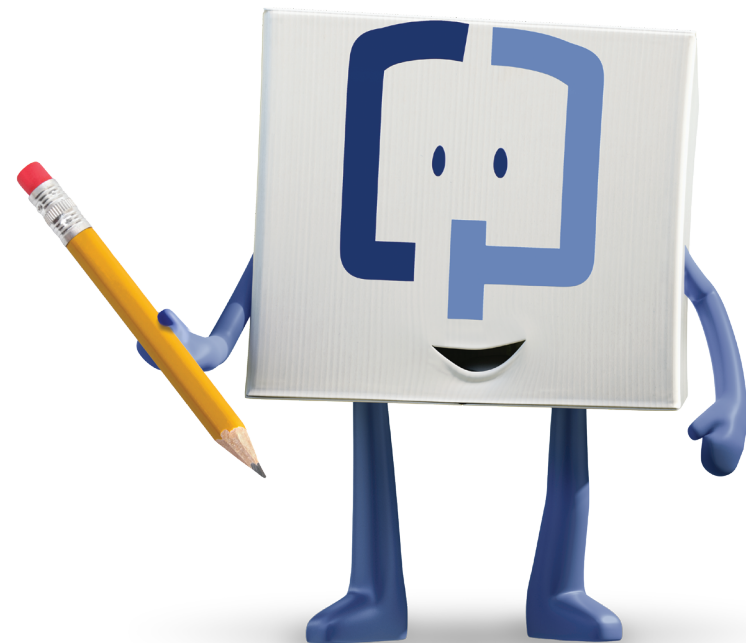


Sử dụng nam châm này để gửi mẫu của quý vị trong vòng 24 giờ
kể từ khi lấy mẫu bằng cách viết xuống các ngày quan trọng.

QUÝ VỊ CẦN HỖ TRỢ?

Hãy gọi đến Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi theo số **1-844-870-8870** hoặc xem video hướng dẫn cách sử dụng tại địa chỉ **CologuardTest.com/use**.

*Hẹn sớm gặp lại
quý vị!*

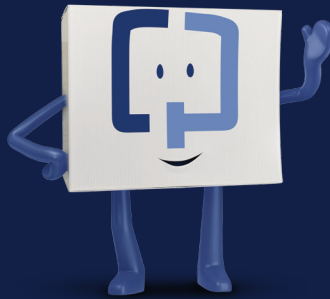

EXACT SCIENCES CORPORATION
441 Charmany Drive, Madison, WI 53719
ExactSciences.com | ExactLabs.com

1-844-870-8870

Cologuard là thương hiệu đã đăng ký của Exact Sciences Corporation.
©2016 Exact Sciences Corporation. Bảo lưu mọi quyền. US.CG.1560-3-Tháng 10 năm 2019

Để biết thêm thông tin hữu ích, hãy vào trang **CologuardTest.com**



**EXACT
SCIENCES**