

No permita que  
una vejiga hiperactiva  
controle su vida.



## Urgent<sup>®</sup> PC


NEUROMODULATION SYSTEM

**Confianza y control de la vejiga sin medicamentos ni cirugía.**

- » Funciona tanto para hombres como para mujeres
- » Opción de bajo riesgo para la mayoría de los pacientes con vejiga hiperactiva
- » Hasta el 80 % de los pacientes mejora con el tratamiento
- » Puede funcionar, incluso cuando otros tratamientos no lo han hecho



## ¿Cómo funciona Urgent PC?

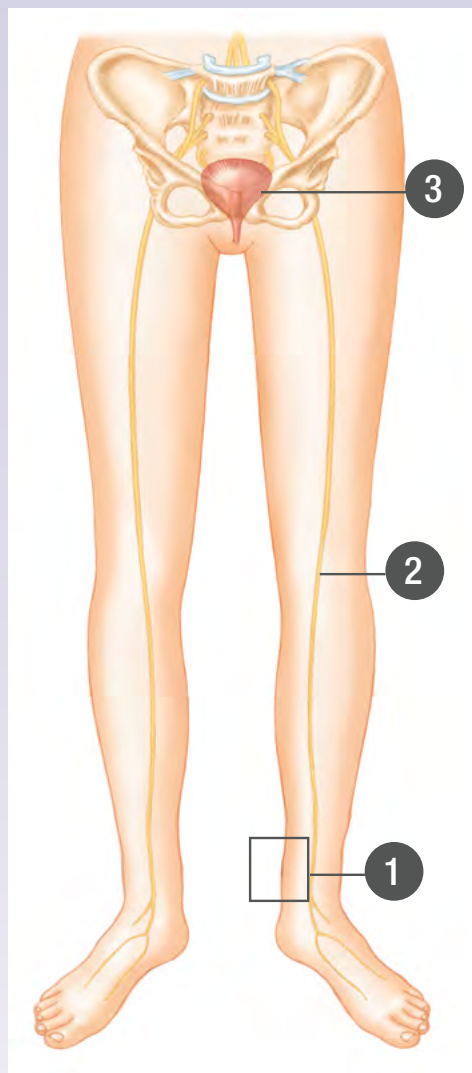

### Urgent PC produce impulsos leves que:

1. Ingresan por el electrodo con aguja colocado cerca del tobillo
2. Viajan hasta el nervio tibial en la pierna
3. Llega a los nervios responsables del control vesical



## ¿Qué dicen los pacientes sobre Urgent PC?

### Volví a disfrutar de la vida

“Llegué al punto en el que no tenía vida social; me daba mucha vergüenza salir a cualquier lado. Ahora, el tratamiento me ha puesto en un lugar donde puedo ir y ver a mis amigos, incluso hasta duermo más. Tengo un estilo de vida diferente y he vuelto a disfrutar de ella”.

- Bobby\*

### Ahora puedo dormir

“[Urgent PC] ha sido un milagro para mí. La incontinencia nocturna se redujo radicalmente y ahora estoy bien descansada. Ya no me preocupo constantemente por accidentes”. - Iradine\*

### Olvidese de llevar almohadillas

“Antes de [Urgent PC], necesitaba llevar almohadillas conmigo así no tendría accidentes. Con este tratamiento, me olvidé de que tengo que llevar las almohadillas conmigo. He podido comenzar un estilo de vida bastante normal y no tengo que preocuparme por las pérdidas o por una situación incómoda”. - Joan\*

\* Los resultados pueden variar, ya que no todos los pacientes experimentan el tratamiento de la misma forma

## ¿Se siente identificado con alguna de estas situaciones?

- Voy al baño más de 8 veces durante el día o 2 veces por la noche
- Cuando voy algún lugar, lo primero que hago es localizar el baño por si tengo la necesidad de usarlo
- A menudo, tengo la repentina necesidad de ir al baño con un pequeño o directamente sin previo aviso
- Cuando debo ir, no lo puedo ignorar
- Me he mojado porque no pude llegar al baño a tiempo
- Limito las actividades que realizo a causa de mis problemas de vejiga

**Consulte a su médico para obtener más información acerca de Urgent PC y otras opciones de tratamiento.**

## ¿Qué implica el tratamiento con Urgent PC?



- » Se coloca un electrodo con aguja fina de forma temporaria cerca del tobillo. Se conecta al electrodo un dispositivo que emite leves impulsos eléctricos.
- » Se realizan doce sesiones semanales de 30 minutos para determinar su nivel de respuesta. Se realizan sesiones mensuales para mantener los resultados.

## ¿Cómo se siente el tratamiento con Urgent PC?

- » “Algunas veces, tengo una sensación de adormecimiento, mientras que otras siento algo pulsátil o vibrante, o un simple movimiento repentino de un dedo del pie”. - Judith\*
- » “Generalmente, siento un hormigueo en los dedos del pie y en la planta del pie durante el tratamiento. Es muy cómodo y relajante”. - Ann\*

\* Los resultados pueden variar, ya que no todos los pacientes experimentan el tratamiento de la misma forma

## ¿Cómo se siente el tratamiento con Urgent PC?

- » Diagnóstico: en primer lugar, deberán evaluarlo para saber si tiene una vejiga hiperactiva. Su médico puede completar sus antecedentes médicos, evaluar su función vesical y pedirle que anote sus hábitos miccionales y accidentes en un diario de micciones.
- » Si su médico de cabecera lo ha derivado a un especialista, no olvide informar al especialista lo que ya ha probado.
- » Si le diagnostican vejiga hiperactiva, su médico trabajará junto a usted en un plan de tratamiento personalizado. Los tratamientos para la vejiga hiperactiva generalmente se realizan en el siguiente orden:

### Tratamientos conductuales

- » Cambiar lo que hace, como controlar la ingesta de líquido
- » Ejercicios para el piso pélvico

### Medicamentos para la vejiga hiperactiva

- » Hay varios disponibles
- » Generalmente se prueba con 2 o 3

### Tratamientos de tercera línea

- » Urgent PC es un tratamiento reconocido para pacientes que no responden a tratamientos conductuales ni a medicamentos para la vejiga hiperactiva
- » Urgent PC puede utilizarse antes si los

## ¡Recuerde!

La mayoría de las personas pueden lograr una mejora significativa de sus síntomas, por lo cual es importante cumplir con el tratamiento, incluso si no percibe resultados inmediatos del tratamiento que le han recetado.

## ¿Me resultará efectivo Urgent PC?

- » Muchos estudios demuestran que hasta un 80 % de los pacientes mejora gracias al tratamiento con Urgent PC.<sup>1-4</sup>
- » La mayoría de los pacientes que utilizan Urgent PC van al baño con menos frecuencia y tienen menos accidentes.<sup>1-4</sup>
- » En un estudio, los pacientes mejoraron entre la semana 2 y la semana 12. A 1 de cada 5 le tomó 8 semanas percibir una mejora.<sup>3</sup>
- » Es importante realizar 12 sesiones de tratamiento antes de que usted y su médico decidan si Urgent PC es adecuado para usted.



**El Sistema de neuromodulación Urgent® PC es un tratamiento sin medicamentos realizado en el consultorio para tratar la vejiga hiperactiva y los síntomas relacionados de urgencia miccional, polaquiuria e incontinencia de urgencia.**

**Consulte a su médico para obtener más información sobre Urgent PC y la neuromodulación.**

**CONTRAINDICACIONES:** El tratamiento con Urgent PC está contraindicado para pacientes con marcapasos o con desfibriladores implantables, pacientes propensos a sangrado excesivo, pacientes con daños en los nervios que podrían afectar tanto la función percutánea del nervio tibial como la función del suelo pélvico, o pacientes que estén embarazadas o que planeen estarlo durante el lapso del tratamiento. **PRECAUCIONES:** Tenga cuidado con los pacientes con problemas cardíacos relacionados con la estimulación cardíaca. La mayoría de los pacientes no presenta efectos secundarios. Si se presentan efectos secundarios, por lo general son temporarios e incluyen un ligero dolor e inflamación de la piel cerca de la zona tratada. **PRECAUCIÓN:** La ley federal (EE. UU.) permite la venta de este dispositivo únicamente bajo prescripción médica o por parte de un médico. Para conocer las instrucciones completas de uso, almacenamiento, advertencias, contraindicaciones, precauciones, reacciones adversas y exención de responsabilidad en cuanto a garantías, consulte el prospecto que acompaña a cada producto Urgent PC o por Internet en [www.cogentixmedical.com](http://www.cogentixmedical.com).

1. MacDiarmid, S.A., & Staskin, D.R. (2009). Percutaneous tibial nerve stimulation (PTNS): a literature-based assessment. *Current Bladder Dysfunction Reports*, 4, 29-33.
2. Visite [www.cogentixmedical.com](http://www.cogentixmedical.com) para leer resúmenes clínicos.
3. Leong, F., McLennan, M.T., Barr, S.A., & Steele, A.C. (2011). Posterior tibial nerve stimulation in patients who have failed anticholinergic therapy: efficacy and time to response. *Female Pelvic Med Reconstr Surg* 17(2), 74-75.
4. Peters, K.M., MacDiarmid, S.A., Wooldridge, L.S., Leong, F.C., Shobeiri, S.A., Rovner, E.S., et al. (2009). Randomized trial of percutaneous tibial nerve stimulation versus extended-release tolterodine: results from the overactive bladder innovative therapy trial. *J Urol*, 182, 1055-1061.

**Cogentix Medical**

5420 Feltl Road

Minnetonka, MN 55343

TOLL-FREE 866.258.2182

FAX 866.255.4522

WWW [urgentpcinfo.com](http://urgentpcinfo.com)

Urgent es una marca registrada. Los modelos se muestran únicamente con fines ilustrativos.

© 2015 Cogentix Medical. Todos los derechos reservados. 20028F-SPC 05/15 EE. UU. y Canadá