

Guia de Colocação e Ajuste

Observação: Antes de colocar a máscara, remova o **suporte laranja da estrutura Spring** do arnês e descarte.



- Com as duas presilhas no arnês soltas, posicione a almofada em ângulo na ponte nasal.




- Mantendo a parte superior da máscara no local, ajuste a parte inferior da máscara, apertando contra o rosto.



- Segure a máscara firmemente contra o rosto e puxe o arnês para trás da cabeça.



- Passe as correias inferiores por baixo das orelhas e fixe o arnês na parte inferior da estrutura Spring.

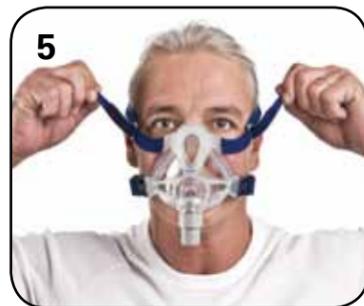

- Solte as pontas de Velcro®, puxe uniformemente as correias superiores do arnês até que a posição seja confortável e volte a prender o Velcro.



- Repita a etapa 5 com as correias inferiores do arnês.



- Conecte uma das extremidades do tubo de ar à peça giratória e a outra ao dispositivo respiratório.
- Ligue o dispositivo respiratório.

Dica um



- Confira se o arnês está posicionado corretamente na cabeça.

Dica dois



- Verifique se a máscara está apoiada na metade da ponte nasal e não aperta os olhos.

Quattro™ FX
MÁSCARA FACIAL

www.quattrofx.com

Menos máscara. Mais você.

Veja o que você está perdendo. Com estrutura leve e amplo campo de visão, a Quattro™ FX oferece a cobertura e a estabilidade de uma máscara facial com design discreto.

Com Quattro FX, a terapia nunca foi tão fácil

Benefícios para você...

Economias de tempo e custo

A Quattro FX fornece ferramentas para obter o melhor ajuste para os seus pacientes—na primeira vez e em todas as vezes.

Recursos novos e intuitivos tornam o ajuste da Quattro FX um processo rápido e direto, economizando tempo, dinheiro e visitas adicionais dos pacientes.

Basta escolher o tamanho, ajustar e selar

A ferramenta de dimensionamento personalizada e a técnica de ajuste Swing Seal tornam fácil alcançar uma selagem confortável e eficaz. A estrutura Spring e o novo design do arnês geram uma “suspensão”, que elimina a necessidade de suporte para testa.

Com selagem forte e menos pontos de ajuste, nunca foi tão fácil colocar e usar uma máscara facial.

Aceitação da terapia

O conforto, o desempenho e a sensação de liberdade que a Quattro FX fornece ajudam os usuários a aceitar a terapia desde o início e manter a conformidade a longo prazo.

...e para os seus pacientes

Desempenho estável

As novas tecnologias na almofada Spring Air™ e na estrutura Spring fornecem a estabilidade e o ajuste de um suporte de testa convencional.

Liberdade

Menos pontos de contato com o rosto reduzem as chances de irritação da pele; uma linha de visão livre ajuda a derrubar as barreiras físicas e emocionais associadas com a terapia de máscara facial.

Uma boa noite de sono

A almofada de alta tecnologia Spring Air distribui a pressão igualmente e absorve até os mais leves movimentos dos usuários, para que possam aproveitar uma boa noite de sono, com a confiança de que a selagem está firme.

Qualidade ResMed

A Quattro FX oferece o conforto e a qualidade superiores da ResMed, nos quais você sabe que pode confiar.

Quattro™ FX
MÁSCARA FACIAL

www.quattrofx.com



Destaque tecnológico

Dimensione. Ajuste. Sele.

Dimensionar, ajustar e selar a Quattro FX é rápido e direto.

1 Dimensione
usando a ferramenta de dimensionamento personalizada

2 Posicione a almofada em ângulo na ponte nasal ...

3 ... e depois **ajuste** a parte inferior da máscara, apertando contra o rosto, para **selar**.

Quattro FX: ajuste correto, selagem segura - na primeira e em todas as vezes.

Linha de visão livre

Gera uma sensação de abertura; uma estrutura menor também torna o sono mais confortável

Design de ventilação integrado

Distribui o ar de forma suave e silenciosa

Estrutura Spring flexível e durável

Firme o suficiente para estabilizar a máscara no rosto, suave o suficiente para acomodar a movimentação do usuário durante o sono

Rotação de cotovelo em 360°

Posiciona o tubo para facilidade de uso

Peça giratória

Oferece uma forma conveniente de conectar e desconectar o tubo de ar



Novo design de Arnês que reduz a tensão

Correia em coroa contornada com ajuste confortável no alto da cabeça, evitando a área sensível na nuca



Membrana de colchão contornada

Descansa suavemente na área sensível da ponte nasal e infla para encontrar suavemente o nariz, em vez de apertá-lo

Almofada de parede dupla Spring Air

Fornecer distribuição suave e equilibrada da pressão, e a parede de isolamento da almofada interna mantém a selagem em caso de abertura da mandíbula

Arnês eficiente

Fácil de segurar para prender e soltar; preserva os ajustes desejados do Arnês

A **Quattro FX** fornece a qualidade da ResMed e conforto facial em uma máscara leve e discreta.



Sistema de armação
(sem Arnês)
61724 (P)
61725 (M)
61726 (G)

Almofada
61721 (P)
61722 (M)
61723 (G)

Arnês
61734 (P)
61733 (M)
61738 (G)

CÓDIGOS DOS PRODUTOS

Sistema completo da máscara facial **Quattro FX**

Tamanho	Código do produto
Pequena	61700
Média	61701
Grande	61702

*O Arnês médio está incluído em todos os tamanhos de máscaras

Para obter detalhes, consulte o **Manual do Usuário da Máscara Facial Quattro FX**.

Quattro™ FX
MÁSCARA FACIAL