

1.

Procedura di attivazione della soluzione per il Felmar



PROCEDURA DI ATTIVAZIONE

FELMAR / RELY+ON VIRKON



FELMAR 100

DRY AEROSOL GENERATOR
PRODOTTO DA MEDICAL JET-ROMANS D'ISONZO (GO)
via Aquileia, 96 - tel. 0432/221111

2.

Utilizzare un
misurino da 5 gr.
di polvere di
Rely+On™ Virkon™

**Rely+On™
Virkon™**




3.

Versare il contenuto del misurino di 5 gr. all'interno del flacone da 1 Litro di SOLUZIONE BASE.

Attendere 10 minuti.



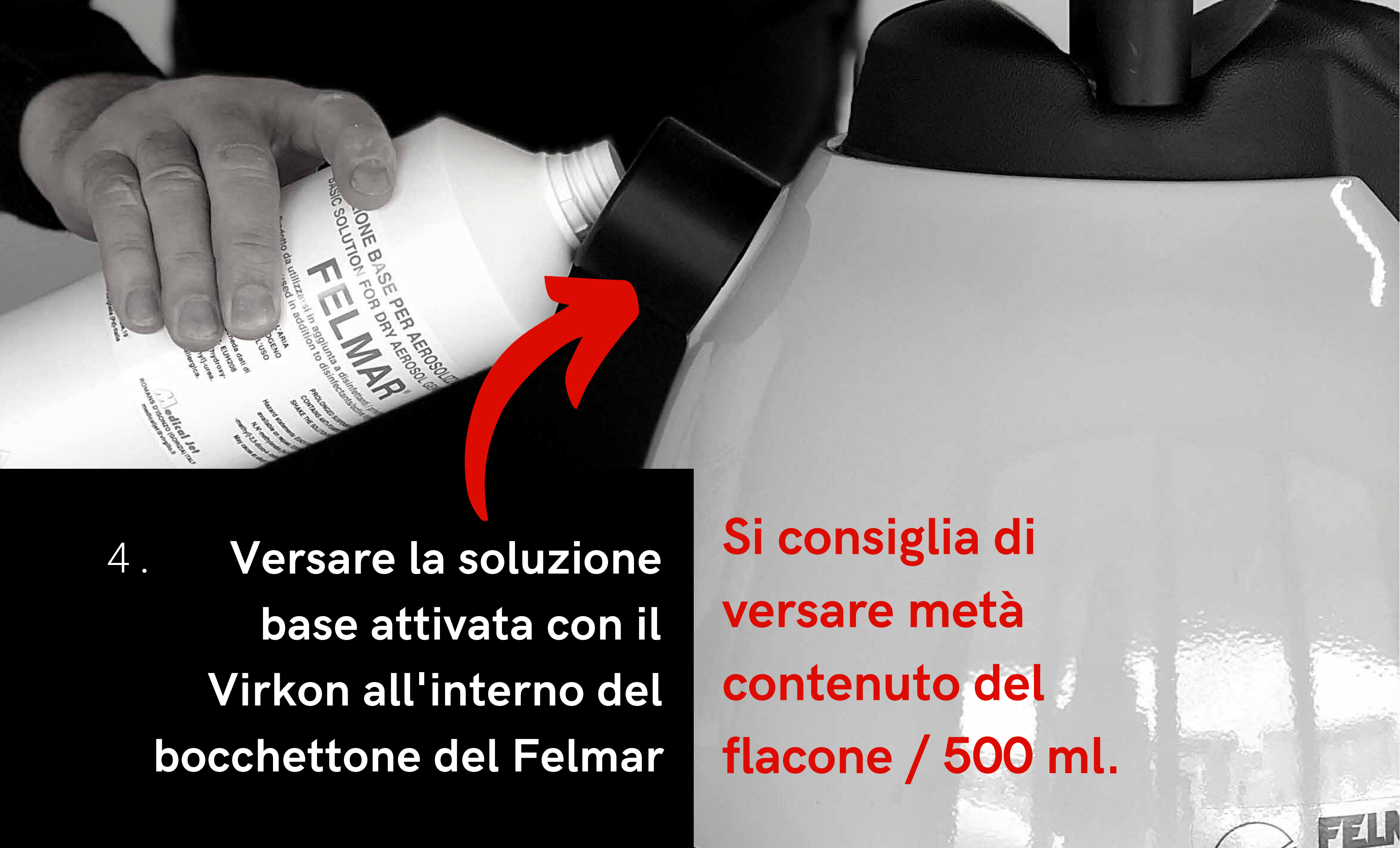

4. **Versare la soluzione base attivata con il Virkon all'interno del bocchettone del Felmar**

Si consiglia di versare metà contenuto del flacone / 500 ml.